

Hinweise zum Versand Ihrer Proben

mit der Deutschen Post AG

Verpackung und Lagerung der Proben

1. **WICHTIG nach den Bestimmungen der gesetzlichen ADR-Richtlinien:** Nach der Probennahme stecken Sie die Probengefäße (Primärgefäße) in die Versandgefäße (Sekundärgefäße).
2. **Achtung:** Bis zur Abholung sollten **Urin-, Speichel- und Stuhlproben gekühlt** gelagert werden.



Proben versandfertig verpacken

Zur Abholung legen Sie die Versandgefäße mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die blaue Versandtasche. Drehen Sie diese auf die Rückseite und entfernen Sie die innenliegende **rote Schutzlasche** des **blauen Klebestreifens**. Zum Verschließen der Versandtasche klappen Sie die selbstklebende Fläche um und drücken diese fest auf.



Versandtasche

Kontakt für Rückfragen

Haben Sie Rückfragen oder spezifische Wünsche?
Gerne steht Ihnen unser Fahrdienst-Service unter

Telefon: +49 6131 7205-360 Mo. – Fr. 8:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: fahrdienst@ganzimmun.de

zur Verfügung.

Benötigen Sie **GO-Versandtüten** oder **Frachtbriefe**?
Bitte fordern Sie diese **2 Tage vor Versand** Ihrer Proben an.

