

24-Stunden-Sammelurin, stabilisiert

Für Kinder & Jugendliche
unzugänglich aufbewahren!

1. Ist Ihr Testpaket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket
vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 brauner 24-Stunden-Sammelbehälter mit grünem Deckel (enthält 1 Urinbecher, Urinröhrchen (30 ml), 1 Röhrchen mit Stabilisierungslösung (45 ml Salzsäure), Etiketten)

Der Stabilisator gewährleistet die Stabilität der Probe während des Versands an das Labor. Wird der Stabilisator ausgeschüttet, kann das Probenmaterial im Labor nicht zuverlässig ausgewertet werden.

Achtung: Der Stabilisator ist ätzend!
Nicht mit Haut oder Schleimhäuten in Berührung bringen. Für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren! Den Stabilisator nicht ausschütten.



- 2 Paar Handschuhe
- 1 Urin-Versandröhrchen mit gelbem Deckel
- 1 Versandtasche

Fehlendes Zubehör können Sie nachfordern:
Tel. +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 -19 Uhr)

2. Testvorbereitung

1. Vor der Probengewinnung nehmen Sie bitte das Gefäß mit der Stabilisierungslösung aus dem braunen 24-Stunden-Sammelbehälter und schütten Sie die Lösung (Salzsäure) in diesen Sammelbehälter. Verwenden Sie hierzu die beigelegten Handschuhe. Das entleerte Gefäß können Sie anschließend mit zugeschraubtem Deckel und den Handschuhen im Hausmüll entsorgen.
2. **Wichtiger Hinweis für Frauen:**
Bitte sammeln Sie keinen Urin während Ihrer Periode.

3. Bitte vermeiden Sie einen Tag vor und während der Sammelperiode:

- übermäßig viel Kaffee, Tee, koffeinhaltige und alkoholische Getränke
- Nikotin
- Avocados, Auberginen, Walnüsse
- folgende Medikamente: Acetylsalicylsäure (Aspirin (R)), Paracetamol, Benzodiazepine, Ephedrin, β -Blocker, Phenothiazine, Promazin, Isoniazid, MAO-Hemmer u.ä., da diese die Genauigkeit der Untersuchungen beeinträchtigen können.

→ Fortsetzung auf nächster Seite

3. Testdurchführung

1. Beginnen Sie mit der Probensammlung morgens.
Der erste Urin nach dem Aufstehen, z. B. um 8 Uhr, wird noch nicht gesammelt, erst die darauf folgenden Urinmengen des gesamten Tages sowie der Nacht, einschließlich des 8 Uhr-Morgenurins des nächsten Tages.
2. Den Urin lassen Sie bitte zunächst in den Urinbecher.
3. Dann schütten Sie den Urin aus dem Urinbecher in den braunen Sammelbehälter.
4. Stellen Sie den Sammelbehälter in den Kühlschrank. Der Urin muss während der gesamten Zeit des Sammelns **gekühlt** werden. Bitte achten Sie auf eine **senkrechte Lagerung des Behälters**.
5. Nach der letzten Probennahme verschließen Sie bitte den Sammelbehälter und schwenken ihn 3-5mal über Kopf. Anschließend lesen Sie die gesammelte Menge Urin an der Skala auf dem Sammelbehälter ab. **Notieren Sie die Gesamtmenge** Ihres gesammelten Urins – neben Ihrem **Namen und dem Probendatum** – auf dem Etikett des Urinröhrchens.

Achtung! Falls aus Versehen ein Urin während der Sammelperiode nicht gesammelt wurde, sollte der Vorgang an einem anderen Tag wiederholt werden. Bitte fordern Sie bei Ihrem Therapeuten ein neues Testset an.



6. Danach füllen Sie bitte mit Hilfe des Urinbechers einen Teil des Urins aus dem Sammelbehälter in das leere Urinröhrchen. Verwenden Sie hierzu die beigelegten Handschuhe. Das Urinröhrchen sollten Sie **bis zu 3/4 füllen**.
7. Den restlichen Inhalt des Sammelbehälters können Sie in der Toilette entsorgen.
8. Den braunen Sammelbehälter, den Urinbecher, die Pipette und die Handschuhe geben Sie bitte in den Hausmüll.
9. Das Urinröhrchen geben Sie in das Versandgefäß und verschließen dieses sorgfältig.

4. Probenversand

Zum Versand legen Sie das Versandgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken.

Achtung:

Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.

Der Versand in **Deutschland** sollte von **Montag bis Donnerstag**, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Aus **Österreich** und der **Schweiz** sollte der Versand von **Montag bis Mittwoch**, nicht vor Feiertagen erfolgen.

Kunden aus der Schweiz sollten beachten, dass die Versandtasche in einer Poststation am Schalter noch am gleichen Tag der Probennahme abzugeben ist.