

1. Ist Ihr Testpaket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 24-Stunden-Sammelbehälter mit gelbem Deckel
- 1 Urinbecher
- 1 Urinröhrchen (mit 1 Urininnenröhrchen und 1 Urinumgefäß für Versand)
- 1 Versandtasche

Fehlendes Zubehör können Sie nachfordern:
Tel. +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 -19 Uhr)

2. Testvorbereitung

1. Bitte vermeiden Sie während der Sammelperiode übermäßig viel Kaffee, Tee oder koffeinhaltige Getränke, da diese die Genauigkeit der Untersuchungen beeinträchtigen.

2. **Wichtiger Hinweis für Frauen:**

Bitte sammeln Sie keinen Urin während Ihrer Periode.

3. Testdurchführung

1. Beginnen Sie z. B. um 8 Uhr morgens, wird dieser Urin noch verworfen; aber alle anderen Urinmengen des gesamten Tages sowie der Nacht müssen gesammelt werden, einschließlich des 8 Uhr-Morgenerins des nächsten Tages.

2. Den Urin lassen Sie bitte zunächst in den Urinbecher.

3. Dann schütten Sie den Urin aus dem Urinbecher in den Sammelbehälter.

4. Stellen Sie den Sammelbehälter in den Kühlschrank. Denn der Urin muss während der gesamten Zeit des Sammelns gekühlt werden. Bitte achten Sie auf eine senkrechte Lagerung des Behälters.

5. Wenn die Sammelperiode abgeschlossen ist, schwenken Sie bitte den Sammelbehälter 3- bis 4-mal über Kopf, füllen Sie anschließend mit Hilfe des Urinbechers einen Teil des Urins aus dem Sammelbehälter in das Urin(innen)röhrchen.

Achtung! Falls aus Versehen ein Urin während der Sammelperiode nicht gesammelt wurde, sollte der Vorgang an einem anderen Tag wiederholt werden. Bitte fordern Sie bei Ihrem Therapeuten ein neues Testset an.



Dieses sollten Sie bis zu $\frac{3}{4}$ füllen. Notieren Sie bitte auf dem Urininnenröhrchen Ihren Namen, das Datum der Probe und die Gesamtmenge Ihres (in dem braunen Sammelbehälter) gesammelten Urins.

6. Den Inhalt des Sammelbehälters können Sie in der Toilette entsorgen. Den braunen Sammelbehälter sowie den Urinbecher geben Sie bitte in den Restmüll.

→ Fortsetzung auf nächster Seite

4. Probenversand

Zum Versand legen Sie das Versandgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken.

Achtung:

Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.

Der Versand in **Deutschland** sollte von **Montag bis Donnerstag**, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Aus **Österreich** und der **Schweiz** sollte der Versand von **Montag bis Mittwoch**, nicht vor Feiertagen erfolgen.

Kunden aus der Schweiz sollten beachten, dass die Versandtasche in einer Poststation am Schalter noch am gleichen Tag der Probennahme abzugeben ist.