

## 1. Ist Ihr Testpaket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Testpaket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 NaF-Röhrchen (Monovette)
- 1 neutrales Röhrchen
- 1 Kanüle (gelb)
- 1 Transferpipette
- 1 Versandgefäß
- 1 Etikett
- 1 Versandtasche

Fehlendes Zubehör können Sie nachfordern:  
Tel. +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 -19 Uhr)

## 2. Testvorbereitung

Vor der Blutentnahme sollte der Patient einige Minuten **ruhen**, körperliche Anstrengungen und Stress sollten vermieden werden.

## 3. Testdurchführung

1. Blutentnahme mittels der beigelegten NaF-Monovette aus der ungestauten Vene.
2. Nach der Blutentnahme sofort **zentrifugieren** (5 min bei mind. 1.600 g). Die Probe nicht schütteln und direkt mittels Transferpipette in ein neutrales Röhrchen mit grünem Aufkleber „NaF-Plasma“ abpipettieren.
3. Beschriften Sie das Etikett auf dem befüllten (neutralen) Röhrchen mit Name des Patienten, Geburtsdatum und Probennahmedatum.
4. Kanüle, Transferpipette und NaF-Röhrchen entsorgen Sie bitte nach Gebrauch ordnungsgemäß in die dafür vorgesehenen Praxisbehälter.

## 4. Probenversand

Zum Versand legen Sie das Versandgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein (Anamneseangaben beachten) in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken.

**Achtung:**

Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.

Der Versand in **Deutschland** sollte von **Montag bis Donnerstag**, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Aus **Österreich** und der **Schweiz** sollte der Versand von **Montag bis Mittwoch**, nicht vor Feiertagen erfolgen.

Kunden aus der Schweiz sollten beachten, dass die Versandtasche in einer Poststation am Schalter noch am gleichen Tag der Probennahme abzugeben ist.