

Für Kinder & Jugendliche
unzugänglich aufbewahren!

1. Ist Ihr Testpaket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Testpaket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 Vaginalabstrich-Besteck:
Copan eNAT-Abstrichröhrchen + Vaginalabstrichtupfer
Achtung: Das Abstrichröhrchen enthält eine ätzende Flüssigkeit (Stabilisator). Bitte den Kontakt meiden! Für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren! Den Stabilisator nicht ausschütten.



Der Stabilisator gewährleistet die Stabilität der Probe während des Versands an das Labor. Wird der Stabilisator ausgeschüttet, kann das Probenmaterial im Labor nicht zuverlässig ausgewertet werden.

- 1 pH-Vaginalapplikator in Folienverpackung
- 1 Etikett zum Eintragen des pH-Wertes
- 1 Versandgefäß für das Abstrichröhrchen
- 1 Versandtasche

Fehlendes Zubehör können Sie nachfordern:
Tel. +49 6131 7205-0 (Mo. - Fr. von 8 -19 Uhr)

2. Testdurchführung

a) Vaginalabstrich

1. Waschen Sie vor Testbeginn Ihre Hände.
2. Nehmen Sie den Vaginalabstrichtupfer aus der Verpackung, halten diesen mit einer Hand fest und spreizen mit der anderen Hand die Schamlippen (Abb. 1).
3. Führen Sie den Abstrichtupfer mit drehender Bewegung 4-5 cm in die Scheide ein (Abb. 2) und streichen Sie ca. 20 Sekunden mit etwas Druck die Scheidenwand ab.
4. Drehen Sie den blauen Verschluss des Versandgefäßes auf und stecken Sie den Tupfer in die Flüssigkeit.
5. Brechen Sie den oberen Teil des Tupferträgers an der Sollbruchstelle über den Rand des Abstrichröhrchens und verschließen Sie dieses sorgfältig. Den abgebrochenen Teil entsorgen Sie bitte.
6. Beschriften Sie das Abstrichröhrchen mit Patientennamen und Probendatum.
7. Stecken Sie das Abstrichröhrchen in das weiße Versandgefäß und verschließen Sie dieses.

ACHTUNG: Der beiliegende Abstrichtupfer darf vor der Entnahme NICHT mit der Flüssigkeit des Abstrichröhrchens benetzt werden. Verätzungsgefahr!

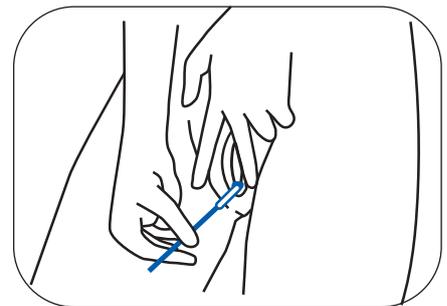


Abb. 1

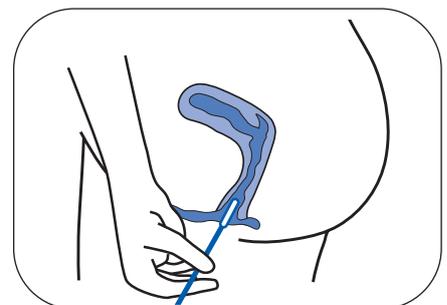


Abb. 2

→ Fortsetzung auf nächster Seite

b) Bestimmung des pH-Wertes

1. Waschen Sie vor dem Testbeginn Ihre Hände.
2. Öffnen Sie die Folienverpackung und nehmen Sie den Applikator an dem vorgesehenen Griffing in die eine Hand (siehe Abb. 1 auf der Folienverpackung). Halten Sie dann mit der freien Hand vorsichtig die äußeren Schamlippen auseinander, so dass die Vaginalöffnung frei zugänglich wird.
3. Halten Sie den Applikator weiterhin am Griffing fest und führen Sie ihn wie einen Tampon bis zu 3 cm tief in die Vagina ein, maximal jedoch bis zum Griffing (siehe Abb. 2 auf der Folienverpackung).
4. Nun drücken Sie den Applikator ca. 10 Sekunden lang vorsichtig gegen die hintere Scheidenwand (Richtung Rücken). Nur so wird der Messbereich zur Bestimmung des pH-Wertes ausreichend befeuchtet.
ACHTUNG! Für die Testauswertung ist eine ausreichende Befeuchtung unbedingt notwendig!
5. Ziehen Sie den Applikator anschließend wieder langsam aus der Vaginalöffnung heraus.
6. Lesen Sie das Testergebnis bitte sofort nach dem Herausziehen des Applikators ab, solange der Messbereich noch ausreichend befeuchtet ist. Nehmen Sie hierzu die Folienverpackung zur Hand und vergleichen Sie die Farbe des pH-Messbereichs auf dem Applikator mit der Farbskala auf der Folienverpackung (siehe Abb. 3 auf der Folienverpackung). Wählen Sie die Farbe auf der Folienverpackung aus, die der Farbe auf dem Applikator am nächsten kommt.
7. Nach dem Ablesen des pH-Wertes tragen Sie das Ergebnis bitte auf dem beiliegenden Etikett ein.
8. Nach Gebrauch entsorgen Sie den Applikator im Hausmüll.

3. Probenversand

Zum Versand legen Sie das Versandgefäß mit der Probe und dem unterschriebenen sowie mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken.

Achtung:

Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.

Der Versand in **Deutschland** sollte von **Montag bis Donnerstag**, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Aus **Österreich** und der **Schweiz** sollte der Versand von **Montag bis Mittwoch**, nicht vor Feiertagen erfolgen.

Kunden aus der Schweiz sollten beachten, dass die Versandtasche in einer Poststation am Schalter noch am gleichen Tag der Probenahme abzugeben ist.