

aus der Zecke (PCR)

1. Ist Ihr Testpaket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Testpaket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- durchsichtiges Probenröhrchen (Saliva)
- 1 Etikett mit der Aufschrift „ZECKE Datum, Name“
- 1 Versandgefäß
- 1 Versandtasche

Fehlendes Zubehör können Sie nachfordern:
Tel. +49 6131-7205-0 (Mo. - Fr. von 8 - 19 Uhr)

2. Testvorbereitung

Achtung: Die Zecke vor der Entfernung bitte nicht mit Öl, Klebstoff, Nagellack o.ä. bedecken.

3. Testdurchführung

1. Greifen Sie die Zecke mit Zeckenzange oder Pinzette möglichst nahe an der Hautoberfläche.
2. Ziehen Sie die Zecke langsam und gleichmäßig aus der Haut.
3. Geben Sie die Zecke in das durchsichtige Probenröhrchen. Verschließen Sie den Deckel sorgfältig.
4. Beschriften Sie das Etikett mit Patientennamen und Probennahmedatum. Kleben Sie dieses auf das Probenröhrchen.
5. Geben Sie das Probenröhrchen in das Versandgefäß.

4. Probenversand

Zum Versand legen Sie das Versandgefäß mit der Zecke sowie dem unterschriebenen und mit Abnahmedatum und -zeit ausgefüllten Probenbegleitschein in die Versandtasche. Verschließen Sie diese sorgfältig, indem Sie die Schutzfolie auf der Innenseite des Klebestreifens entfernen und die Verschlussstellen fest aufeinander drücken.

Achtung:
Der Umschlag lässt sich anschließend nicht mehr öffnen.

Der Versand in **Deutschland** sollte von **Montag bis Donnerstag**, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Aus **Österreich** und der **Schweiz** sollte der Versand von **Montag bis Mittwoch**, nicht vor Feiertagen erfolgen.

Kunden aus der Schweiz sollten beachten, dass die Versandtasche in einer Poststation am Schalter noch am gleichen Tag der Probennahme abzugeben ist.