

Hinweise zum Versand Ihrer Proben

mit der Deutschen Post AG

Verpackung und Lagerung der Proben

1. **WICHTIG nach den Bestimmungen der gesetzlichen ADR-Richtlinien:** Nach der Probennahme stecken Sie die Probengefäße (Primärgefäße) in die Versandgefäße (Sekundärgefäße).
2. **Achtung:** Bis zur Abholung sollten **Urin-, Speichel- und Stuhlproben gekühlt** gelagert werden.



Proben versandfertig verpacken

Zur Abholung legen Sie die Versandgefäße mit dem ausgefüllten Anforderungsbogen in die blaue Versandtasche. Drehen Sie diese auf die Rückseite und entfernen Sie die innenliegende rote Schutzlasche des blauen Klebestreifens. Zum Verschließen der Versandtasche klappen Sie die selbstklebende Fläche um und drücken diese fest auf.



Versandtasche

Kontakt für Rückfragen

Haben Sie Rückfragen oder spezifische Wünsche?
Gerne steht Ihnen unser Fahrdienst-Service unter

Telefon: +49 6131 7205-360 Mo. – Fr. 8:00 – 17:00 Uhr

E-Mail: fahrdienst@ganzimmun.de

zur Verfügung.

Benötigen Sie **GO-Versandtüten** oder **Frachtbriefe**?
Bitte fordern Sie diese **2 Tage vor Versand** Ihrer Proben an.

