


Hinweise zum Versand Ihrer Proben aus der Schweiz

1. Folgende **Materialien** stellen wir Ihnen zur Verfügung:

a) Anforderungsformular
und Barcode-Etiketten

a)

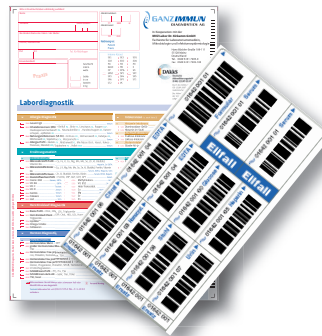

b) Proben- und Versandgefässe

b)



c) Versandtasche der GANZIMMUN Diagnostics AG

c)




2. Zur eindeutigen Kennzeichnung der Proben (d) verwenden Sie bitte die **Barcode-Etiketten**.

3. Nach der Probenentnahme stecken Sie die - mit den Barcode-Etikett gekennzeichneten - Probengefässe (Primärgefässe) in die **Versandgefässe** (Sekundärgefässe).

4. Die Versandgefässe mit den Proben stecken Sie in die **Versandtasche** (c) und geben diese am gleichen Tag am Schalter einer Schweizer Poststelle bis Schalterschluss ab. Der Versand sollte vorzugsweise **montags bis mittwochs** erfolgen.

d)

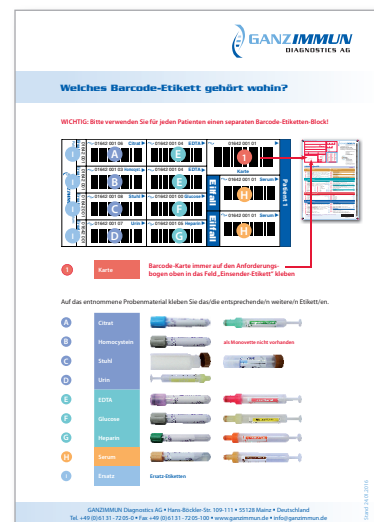

Haben Sie Fragen oder Wünsche? Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer **+49 (0)6131 7205 360** montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr zur Verfügung.

Ihr

GANZIMMUN-Service-Team