

## Hinweise zum Versand Ihrer Proben aus Österreich


Diese Hinweise gelten ausschließlich für Proben, die nicht per Express zu versenden sind.  
Für **Express-Proben** gelten unsere "**Hinweise zum Versand Ihrer Proben aus dem Ausland (Express)**".

1. Folgende **Materialien** stellen wir Ihnen zur Verfügung:


a) Anforderungsformulare und Barcode-Etiketten



b) Proben- und Versandgefäße

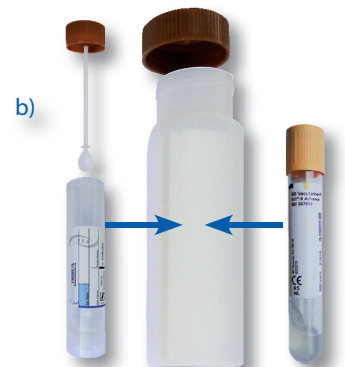

c) Versandtasche des Therapiezentrums Millergasse

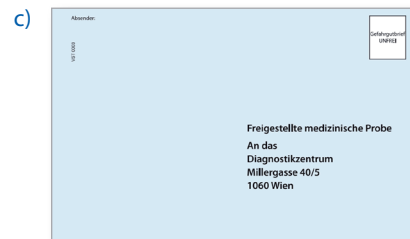

2. Zur eindeutigen Kennzeichnung der Proben (**d**) verwenden Sie bitte die **Barcode-Etiketten**.

3. Nach der Probenentnahme stecken Sie die - mit den Barcode-Etikett gekennzeichneten - Probengefäße (Primärgefäße) in die **Versandgefäße** (Sekundärgefäße).



4. Die Versandgefäße mit den Proben stecken Sie in die **Versandtasche** und werfen diese in einen nahe gelegenen Briefkasten der Österreichischen Post oder geben die Versandtasche unfrankiert auf einem Postamt ab. Der Versand sollte vorzugsweise montags bis donnerstags erfolgen.

Haben Sie Fragen oder Wünsche? Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer **+49 6131 7205 360** montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr zur Verfügung.

Ihr  
**GANZIMMUN**-Service-Team