# **Hinweise zum Versand Ihrer Proben**

aus Österreich

Diese Hinweise gelten ausschließlich für Proben, die nicht per Express zu versenden sind.

#### Materialien

Folgende Materialien stellen wir Ihnen zur Verfügung:

- Anforderungsformular und Barcode-Etiketten
- Proben- und Versandgefäße
- Versandtasche des Diagnostikzentrums Millergasse

#### Probenkennzeichnung

Zur eindeutigen Kennzeichnung der Proben verwenden Sie bitte die Barcode-Etiketten (siehe Rückseite).

## Proben versandfertig verpacken

Nach der Probenentnahme stecken Sie die – mit den Barcode-Etikett gekennzeichneten – Probengefäße (Primärgefäße) in die Versandgefäße (Sekundärgefäße).

Die Versandgefäße mit den Proben stecken Sie in die Versandtasche und werfen diese in einen nahe gelegenen Briefkasten der Österreichischen Post ein oder geben die Versandtasche unfrankiert auf einem Postamt ab. Der Versand sollte vorzugsweise montags bis donnerstags erfolgen.

### Kontakt für Rückfragen

Haben Sie Fragen oder Wünsche? Gerne steht Ihnen unser Fahrdienst-Service unter

Telefon: +49 6131 7205-360 Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr

E-Mail: fahrdienst@ganzimmun.de

zur Verfügung.





Versandgefäß (Sekundärgefäß)



Versandtasche des Diagnostikzentrums Millergasse



# **Praxisinformation**

## Probenkennzeichnung mittels Barcode-Etiketten

- Das Etikett "Bogen" muss auf dem Anforderungsbogen oben mittig im gleichnamigen Feld platziert werden.
- Die restlichen Barcode-Etiketten k\u00f6nnen beliebig auf die einzelnen Probengef\u00e4\u00dfe verteilt werden.
  Jedes Probengef\u00e4\u00df muss mit einem Etikett versehen werden.
- Das untere Etikett "Patient / Datum" kleben Sie in das Labor-Journal.



